

SHEARBAN®

Tecnología para el Alivio de la Fricción

Instrucciones para Reducir la Fricción y Fuerzas de Roce con el uso de ShearBan®

ShearBan® complementa la técnica tradicional para aliviar la presión al reducir la fuerza de roce entre el calzado, el aditamento ortésico ó protésico y la piel.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

- 1) Si es necesario, limpie la superficie donde lo aplicará eliminando humedad o polvo.
- 2) Corte de la lámina de ShearBan® el pedazo de tamaño/forma necesaria con una tijera bien afilada asegurándose que su parche se extienda aproximadamente 1/4 de pulgada por fuera del área que desea cubrir.

Recorte de manera redondeada todas las esquinas para evitar que se despegue después de haberlo instalado.

Aplique el parche de ShearBan® directamente en el calzado, plantilla o en su aditamento ortopédico. No lo aplique en la piel. Aplíquelo firmemente y presione alrededor de los bordes y la superficie del parche para asegurar que se adhiere correctamente.

TECNICAS OPCIONALES DE FABRICACION

- Caliente cuidadosamente el parche con una pistola de calor o una antorcha pequeña para suavizarlo mientras lo coloca en los contornos y bordes de su aditamento ortopédico y calzado. Tenga cuidado de no aplicar calor excesivo.
- Coloque el ShearBan® sobre el molde para que al termoformar la plantilla, la succión ayude a incrustar los bordes.

NOTA: Tamarack no sugiere que ShearBan® sea un sustituto en el apropiado ajuste de la ortésis de soporte y no se hace responsable de los resultados no deseados secundarios a su manejo de la fricción.

Está buscando algunos consejos y técnicas para mejorar su experiencia con ShearBan®?

Solicite nuestra nueva Guía del Producto ShearBan®!
Visite www.shearban.com y presione **ShearBan® Product Guide** bajo la ventana de Downloads



Tamarack™
HABILITATION TECHNOLOGIES, INC.

(Web) www.tamarackhti.com
(Email) info@tamarackhti.com

© 1998-2010 ShearBan is a registered trademark of Tamarack Habilitation Technologies, Inc.
ISO 13485:2003 Registered QMS U.S. Patent No. 6,362,387 Rev. 2-03/10 CE



Disponible en lámina individual y paquete de cinco láminas y Parches Ovalados pre cortados.

No DE PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
749S-BEIGE	9"x 12" Lámina ShearBan® (crema)	1 Lámina
749S-BLUE	9"x 12" Lámina ShearBan® (azul)	1 Lámina
749-BEIGE	9"x 12" Lámina ShearBan® (crema)	5 Lámina
749-BLUE	9"x 12" Lámina ShearBan® (azul)	5 Lámina
749-OVAL	1.75"x 2.75" ShearBan® Ovals (azul)	1 Óvalo
749-OV12	1.75"x 2.75" ShearBan® Ovals (azul)	12 Óvalos

Cómo comprar ShearBan®:

Contacte a Becker Orthopedic
(248) 588-7480

O visite BeckerOrthopedic.com

Para conocer la lista de distribuidores alrededor del mundo